

## ポータブルトイレ + 簡易トイレ 10

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。  
ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。  
※この取扱説明書は印刷して大切に保管してください。※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。  
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。※掲載されている写真は、全てイメージです。  
※記載されている商品名及び社名は、各社の商標、または登録商標です。

## ポータブルトイレ

## 本製品の構成と名称



## ご使用前に必ずお読みください

- 警告**
- 本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。本製品の破損の原因になります。
  - 火気(ライター等)の危険物はいれしないでください。
  - 使用される前に本製品が確実に組み立てられているかをご確認ください。
  - 本製品を落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
  - 収納袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
  - 梱包材の袋は頭に被るなどせず、開封後にすぐに捨ててください。
  - 耐荷重は100kgです。それ以上の重みを加えると破損・変形の恐れがあります。
- 注意**
- 過度に偏って体重を掛け乗らないでください。転倒して危険です。
  - 本体は水平な場所でお使いください。
  - 本体の収納は付属の収納袋をお使いください。
  - お子様の手の届かない場所に保管してください。
  - 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

## ポータブルトイレの組み立て方



1 蓋を離してください。



2 上から一辺ずつ起こしてください。



3 二辺の間に三辺目と四辺目をはめ込んでください。



4 三辺目と四辺目がしっかりとロックしている事をご確認ください。



5 蓋をのせてください。※蓋に前後の向きはありません。

## ポータブルトイレの片付け方



1 本体が汚れた場合は、柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤で水洗いし、柔らかい布でしっかり水を拭き取ってください。



2 畳んでいく辺の順は本体下部の形状を確認してください。



3 本体上部の四隅にあるロックボタンを押して①～④の順に一辺ずつ畳んでください。



4 蓋を乗せてください。※蓋の向きはありません。



5 収納袋に入れストッパーで固定してください。

以下に簡易トイレの説明書が続きます





# 簡易トイレ

## 本製品の構成と名称

凝固剤 × 10 袋

排泄袋 × 10 枚



## ご使用前に必ずお読みください

**警告**

●凝固剤は食べられません。万が一食べてしまった場合は、本製品とパッケージを持参し、医師に相談してください。●凝固剤が肌に触れないように注意してください。●凝固剤が目に入ったり皮膚に付いたりした場合は、水で洗い流してください。異常を感じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。●衛生上、使用毎に凝固剤と排泄袋を交換してください。

**注意**

●使用した排泄袋はすぐに処分してください。●尿に異常がある場合は、固まりにくいことがあります。●尖った物に触れさせないでください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。●湿気のある場所での保管は避けてください。●尿の量は成人の平均的な通常量を目安としています。尿の量が多くて固まりにくい場合があります。●使用後の排泄物の処分は各自治体の条例に従ってください。●凝固剤をトイレに流すのはおやめください。トイレ詰まりの原因となります。●ご家庭の便器にご使用になる場合は排泄袋の外側が便器の水で濡れますので捨てる際は十分お気をつけください。●上記警告・注意に従わない場合等、誤ったご使用をされた際の事故、破損等につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

## ポータブルトイレに簡易トイレをセットする方法

1



本体に排泄袋をセットしてください。

2



排泄袋をセットした本体に蓋を載せてください。  
※蓋に前後の向きはありません。

3



用をたした後に凝固剤を全て振り入れてください。

4



排泄袋を取り出して各自治体の条例に従ってごみとして捨ててください。  
※使用毎に凝固剤と排泄袋を交換してください。

ポータブルトイレ用 簡易トイレはインターネットでお買い求めいただけます。

別売品(2024年9月現在)

品番:IMP310

品名:ポータブルトイレ用 簡易トイレ30



品番:IMP311

品名:ポータブルトイレ用 簡易トイレ50



➡ 本製品に関するお問い合わせは ...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)  
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1