

ポータブルトイレ用 簡易トイレ 50

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
 ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
 ※この取扱説明書は印刷して大切に保管してください。※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
 ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。※掲載されている写真は、全てイメージ
 です。※記載されている商品名及び社名は、各社の商標、または登録商標です。

本製品の構成と名称

凝固剤 × 50 袋

排泄袋 × 50 枚



ご使用前に必ずお読みください

警告

●凝固剤は食べられません。万が一食べてしまった場合は、本製品とパッケージを持参し、医師に相談してください。●凝固剤が肌に触れないように注意してください。●凝固剤が目に入ったり皮膚に付いたりした場合は、水で洗い流してください。異常を感じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。●衛生上、使用毎に凝固剤と排泄袋を交換してください。

注意

●使用した排泄袋はすぐに処分してください。●尿に異常がある場合は、固まりにくいことがあります。●尖った物に触れさせないでください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。●湿気のある場所での保管は避けてください。●尿の量は成人の平均的な通常量を目安としています。尿の量が多くて固まりにくい場合があります。●使用後の排泄物の処分は各自治体の条例に従ってください。●凝固剤をトイレに流すのはおやめください。トイレ詰まりの原因となります。●ご家庭の便器にご使用になる場合は排泄袋の外側が便器の水で濡れますので捨てる際は十分お気をつけください。●上記警告・注意に従われない場合等、誤ったご使用をされた際の事故、破損等につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

簡易トイレを便器にセットする方法

1



便座を上げて排泄袋を広げてください。

2



便器に排泄袋をセットしてください。

3



用をたした後、凝固剤を全て振り入れてください。

4



排泄袋を取り出して各自治体の条例に従ってごみとして捨ててください。
 ※使用毎に凝固剤と排泄袋を交換してください。
 ※排泄袋の外側が便器の水で濡れますので捨てる際は十分お気をつけください。

➡ 本製品に関するお問い合わせは ...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)
 〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1